

## نظام محركات جديد لأطباء الغرس



السيد **Beda Hutter** مؤسس الشركة، ومركز الشركة السويسرية **NOUVAG AG**

بإستعمال مفتاحين للقدم للتحكم بمضخة التبريد وبإتجاه دوران الأداة المركبة على القبضة.

وقد سهلت الشركة الصانعة خدمة الجهاز بشكل أكبر في النموذج ٢٠٠. وصممه بشكل أكثر منطقية وبداهة. كذلك تم تفصيل تعليمات الإستعمال في بعض المجالات وتحديثها.

يمكن الحصول على معلومات إضافية على الموقع [www.nouvag.com](http://www.nouvag.com)



هنا في بلدة **Goldach** السويسرية يتم تصنيع أجهزة **NOUVAG**

يمكن قراءة كل قرائن ضبط الجهاز بنظرة واحدة إلى الشاشة واستكمالها بالزمن الحقيقي بمؤشر قياس السرعة وكذلك بالعرض التصويري لعزم الدوران. وتسهل لوحة المفاتيح السهلة التنظيف ذات رد الفعل المحسوس والمزود بإشارة صوتية تشغيل الجهاز وتعطي المستعمل الشعور بالأمان في إستعمال الجهاز.

وضع مجموعة الخراطيم في الذراع المتحرك ذو الفتحة الواسعة سهل جداً بفضل مجال الرؤية الممتاز. تعدل المعايير المنتظمة للقبضات اليدوية والمعوجة تغيرات السرعة وعزم الدوران الناجمة عن إختلاف التزييت داخل الجهاز. ويمكن في قائمة التعديلات ضبط عدد كبير من المعايير حسب الحاجة الفردية لطبيب الغرس. فيمكن مثلاً ضبط إضاءة الشاشة وسلوك الضخ وعمل المحرك وكذلك أسلوب عمل عزم الدوران بدقة. كذلك يمكن قراءة مدة عمل المحرك والجهاز والمضخة. وفي حال التعرض لخطأ في بعض الإعدادات يمكن إعادة الجهاز من جديد إلى وضعية الإعداد الأساسي من المصنع.

عبر دواسة القدم بلوحها العريضة يمكن تعديل سرعة دوران القبضة اليدوية بدقة، كما يمكن

ماذا يحتاج طبيب الغرس ليقوم بعمله بشكل فعال ومريح وعلى مستوى رفيع من الجودة؟ إنه يحتاج لنظام محركات ملائم بالضبط لحاجاته. الشركة السويسرية **Nouvag AG** تولي اهتمامها منذ تأسيسها لعمل أطباء الغرس وقد ساهمت بشكل فعال في تحديد أسلوب عملهم. ويعتبر نظام المحركات الجديد لأعمال الغرس MD 11 نتيجة ٤٠ سنة من الخبرة في تطوير الأنظمة المساعدة لطبيب الغرس. وتسمح ميزة عرض المعلومات بشكل يجعل الإحاطة بها بنظرة واحدة مع ميزة الإستعمال السهل والموثوقية الأسطورية لهذا الجهاز لطبيب الغرس بصب كل خبرته وقدرته في عمله اليومي دون عائق. ويبقى المريض في المركز الأول لإهتمام الطبيب.

نظام محركات الغرس الجديد MD 11 مصمم للإستعمال الواسع مع ٥ قبضات يدوية معوجة مختلفة، وينسب تعديل السرعة ١:١، ١:١.٦، ١:٢.٠، وحتى القبضة المعوجة بنسبة ١:٧.٠. وتغطي القبضة المعوجة بنسبة تعديل ١:٢.٠ المجال الواسع لطب الغرس ويمكن بالإضافة لذلك تزويدها عند الطلب بإضاءة من نوع LED.



## الجيل الحديث من محركات Nouvag

صمم نظام المحركات MD 30 للإستعمال في أعمال الغرس السني والجراحة المجهريّة. وهو يتميز بقائمة واسعة جداً من التطبيقات والقطع الإضافية، وكذلك بقابلية التعديل حسب الحاجة الفردية لكل من الأدوات والإستعمالات. أما نظام MD 10 فصمم خصيصاً لأغراض الغرس السني فقط. ويترك أسلوب تشغيله السهل والبديهي المجال أمام طبيب الغرس للتفرغ لعمله مع توفير كل المعلومات الضرورية تحت مراقبته بنظرة واحدة. ويشترك النظامان بالجودة العالية في التصنيع والتفاصيل المدروسة والتحكم الدقيق بعمل المحرك، مما يقود لرضى الطبيب والمريض على السواء. وتستكمل القبضات اليدوية والمعوجة بكل نسب رفع وخفض السرعة والمخصصة لأعمال الغرس السني والجراحة المجهريّة برنامج المنتجات، وكلها مصنوعة بدقة عالية وبمستوى رفيع من الجودة.

يسرنا أن نرسل لكم معلومات إضافية حول مجمل برنامج منتجات Nouvag. [Info@nouvag.com](mailto:Info@nouvag.com)



Nouvag AG · St.Gallerstr. 23-25 · CH-9403 Goldach  
Tel +41 (0)71 846 66 00 · Fax +41 (0)71 846 66 70  
[info@nouvag.com](mailto:info@nouvag.com) · [www.nouvag.com](http://www.nouvag.com)

Nouvag GmbH · Schulthaißtr. 15 · D-78462 Konstanz  
Tel +49 (0)7531 1290-0 · Fax +49 (0)7531 1290-12  
[info-de@nouvag.com](mailto:info-de@nouvag.com) · [www.nouvag.com](http://www.nouvag.com)